



Jeringa de gasometría Pro-Vent® Luer Slip heparina seca con sistema de seguridad EDGE® y dispositivo de eliminación de burbujas de aire Filter-Pro®

Guía de uso

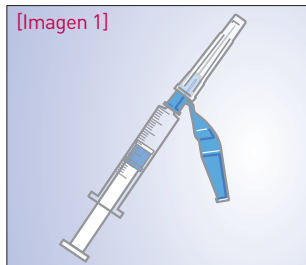



1 Preajuste del volumen de muestra

- Preajuste el émbolo de la jeringa Pro-Vent® en el volumen de muestra deseado. [Imagen 1]

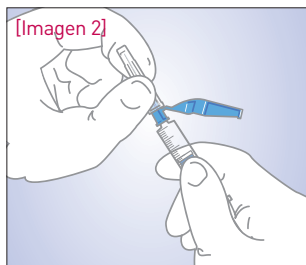

2 Fijación de la aguja

- Asegúrese de que el dispositivo EDGE™ se encuentre bien fijado a la jeringa con un movimiento de giro suave. [Imagen 2]
- La aguja se encuentra en posición de bisel "hacia arriba" cuando la funda de seguridad EDGE™ está a la derecha.
- Para retirar el capuchón de la aguja, tire de él hacia fuera.

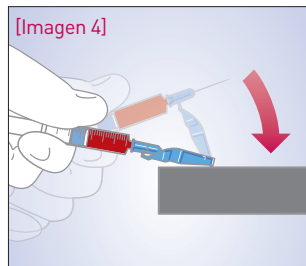
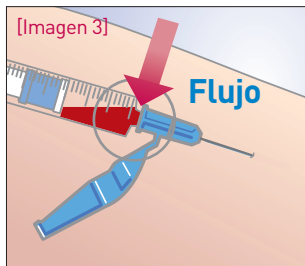


3 Realización del procedimiento

- Practique la punción al paciente y observe en la luz del cono si aparece el flujo de sangre [imagen 3]. Deje que la jeringa se llene hasta el volumen deseado. Extraiga la aguja y atienda el punto de punción con la mano que tiene libre.

4 Dispositivo de seguridad EDGE™

- Con una sola mano, presione la funda de seguridad del dispositivo EDGE™ contra una superficie plana hasta que la aguja se inserte firmemente en la funda (escuchará un clic). NO UTILICE su mano libre para empujar la funda de seguridad sobre la aguja. [Imagen 4]

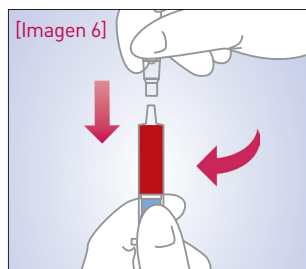
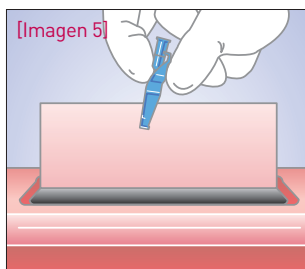


5 Eliminación

- Desacople el dispositivo EDGE™ y deséchelo en un contenedor adecuado para objetos punzantes. [Imagen 5]

6 Colocación del dispositivo Filter-Pro®

- Acople el dispositivo Filter-Pro® en el cono Luer de la jeringa asegurándose de que esté bien fijado. Gire el dispositivo sobre la punta de la jeringa para asegurar el conjunto. [Imagen 6]

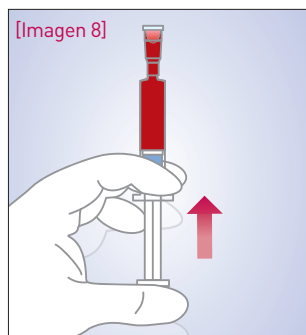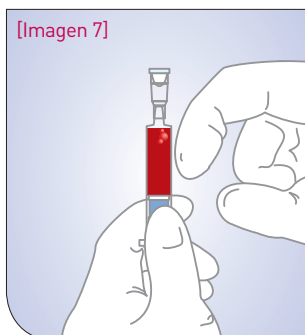

7 Preparar jeringa para purgado

- Sostenga el extremo Luer de la jeringa hacia arriba y dele golpecitos para mover las burbujas de aire a la parte superior. [Imagen 7]

8 Empuje el émbolo lentamente

- Empuje el émbolo **lentamente** para extraer el aire de la muestra. El filtro se sella al entrar en contacto con la sangre, lo que permite que el dispositivo Filter-Pro® sirva como **tapón de transporte**. [Imagen 8]
- Mezcle la muestra, sosteniendo la jeringa con una mano y realizando un movimiento rotatorio de la muñeca de un lado a otro de 20 a 30 segundos.
- Etiquétela y trasládela. Los análisis deberán realizarse en los 30 minutos posteriores a la extracción.

Consulte las instrucciones de uso/el manual de usuario para obtener una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO O LOS PRODUCTOS DESCRITOS NO ESTÉN AUTORIZADOS O A LA VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES.

Smiths Medical ASD, Inc.
Keene 03431 (New Hampshire, EE. UU.)
Teléfono: 1 603 352 3812
Llamada gratuita en EE. UU.: 1 800 258 5361
www.smiths-medical.com

Smiths Medical España S.r.l.
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 00

MKEECA-0030

CE 0473 Rx ONLY

PORTEX®

Consulte la información de contacto local en: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical forma parte de la multinacional tecnológica Smiths Group plc. Portex, EDGE, Pro-Vent y las marcas de diseño Portex y Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial está registrada en los Estados Unidos, Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. y algunos otros países. El resto de las marcas y los nombres mencionados son marcas comerciales o de servicio de sus respectivos propietarios. ©2014 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. SS195293ES-042014