

GRIPPER PLUS®

Aguja de Seguridad



Acceso al portal

Prepare la zona del portal de acuerdo con el protocolo del hospital. Inserte la aguja de seguridad GRIPPER PLUS® en el portal con un ángulo de 90°.



Retirar la pinza de sujeción

Retire la pinza de sujeción deslizándola hacia el extremo final del brazo de inserción y tirando hacia arriba.



Retirar la aguja con dos dedos sobre la base

Para retirar la aguja del portal, sujete la aguja de seguridad GRIPPER PLUS® desde atrás. Coloque los dedos sobre la base para estabilizar la aguja.



Levantarse el brazo de seguridad

Con la otra mano, coloque un dedo sobre la punta del brazo de seguridad. Levante el brazo de seguridad hacia arriba y hacia atrás. Observe que la aguja sale perfectamente recta.



Bloqueo de la aguja ("clic")

Siga levantando el brazo de seguridad hasta escuchar un "clic". La aguja de seguridad GRIPPER PLUS® queda entonces en la posición de bloqueo. Deseche la aguja en un recipiente para dispositivos punzo-cortantes.

Disponible para inyección de contraste a alta presión

GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.

Aguja de Seguridad para Alta Presión



- > **Tubo azul** para una fácil identificación como apta para alta presión
- > **Pinza serigrafiada** con las especificaciones de flujo máximo (alta presión)



GRIPPER PLUS® POWER P.A.C. (*)

Calibre	Longitud	Código color pinza	Código de producto	
			con puerto Y y conector de bioseguridad CSA ⁽¹⁾	sin puerto Y
19 G	19 mm	beige	21-3468-24	21-3368-24
19 G	25 mm	beige	21-3469-24	21-3364-24
19 G	32 mm	beige	21-3470-24	21-3365-24
20 G	16 mm	amarilla	21-3464-24	21-3369-24
20 G	19 mm	amarilla	21-3465-24	21-3367-24
20 G	25 mm	amarilla	21-3466-24	21-3362-24
20 G	32 mm	amarilla	21-3467-24	21-3363-24

(*) Máximo flujo: 5 ml/seg

No inyecte medios de contraste a alta presión sin verificar que el portal es apto para ello

GRIPPER PLUS®

Calibre	Longitud	Código color pinza	Código de producto		
			con puerto Y y conector de bioseguridad CSA ⁽¹⁾	con puerto Y	sin puerto Y
19 G	19 mm	beige	21-2968-24	21-2868-24	21-2768-24
19 G	25 mm	beige	21-2969-24	21-2869-24	21-2764-24
19 G	32 mm	beige	21-2970-24	21-2870-24	21-2765-24
20 G	16 mm	amarilla	21-2964-24	21-2864-24	21-2769-24
20 G	19 mm	amarilla	21-2965-24	21-2865-24	21-2767-24
20 G	25 mm	amarilla	21-2966-24	21-2866-24	21-2762-24
20 G	32 mm	amarilla	21-2967-24	21-2867-24	21-2763-24
22 G	16 mm	negra	21-2960-24	21-2860-24	21-2770-24
22 G	19 mm	negra	21-2961-24	21-2861-24	21-2766-24
22 G	25 mm	negra	21-2962-24	21-2862-24	21-2760-24
22 G	32 mm	negra	21-2963-24	21-2863-24	21-2761-24

(1) Conector sin aguja

INFORMACIÓN VÁLIDA EN EL MOMENTO DE SU IMPRESIÓN. LA COMPAÑÍA SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR CAMBIOS DE MEJORA.

Smiths Medical España S.R.L.

Avda. Diagonal 635. 08028 Barcelona

Tel: 93 363 84 00 Fax: 93 410 47 07

www.smiths-medical.com

GRIPPER PLUS, Smiths Medical y Deltec son marcas registradas de Smiths Medical. Los símbolos ® y ™ indica que las marcas están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE.UU. y en otros países.

© 2011 Smiths Medical familia de compañías. Todos los derechos reservados.

Nº catálogo: LIT/VA 19389SP A4 11/11

Deltec™

smiths medical