

Introcan Safety

Catéter Intravenoso Periférico

Recomendaciones para su uso



Preparación

- Reúna todos los materiales necesarios para colocar el acceso venoso y su fijación.
- Prepare el sitio de punción de acuerdo al protocolo de la Institución.
- Quite el protector del catéter tirando hacia afuera con un movimiento firme y recto.
- Compruebe que el catéter está correctamente adherido a la cámara de visualización para evitar que rote en el momento de la punción.


Punción

- Realice una pequeña tracción de la piel.
- Ajuste el ángulo de punción de acuerdo a sus necesidades.
- Compruebe el éxito de la punción con el retorno de sangre en la cámara de visualización. (Figura A)




Posición del catéter

Después de la punción, coloque el catéter paralelo a la piel y avance suavemente unos milímetros sin despegarlo del fiador. (Figura B)

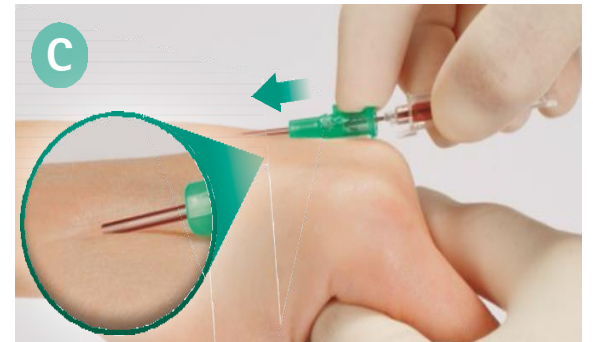

Avance de la cánula

- Utilice la pestaña de empuje y avance la cánula hasta introducirla completamente.
- Mientras lo hace observará el retorno venoso a través de la cánula. (Figura C)
- Libere el torniquete.

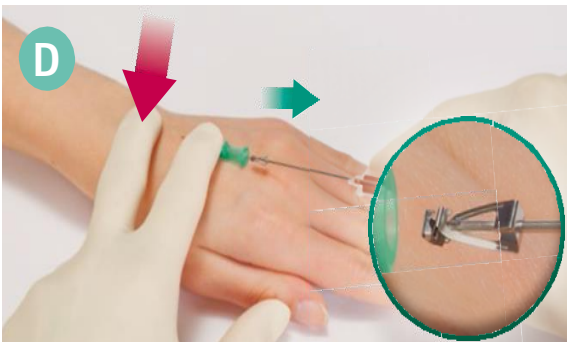

Oclusión y estabilización del catéter

- Con el dedo medio ocluya la vena en el extremo distal del catéter para interrumpir el flujo de sangre.
- Con el dedo índice, sostenga el cuerpo del catéter para evitar su desplazamiento.
- Retire el fiador tirando hacia atrás suavemente, con un movimiento recto.
- El sistema de seguridad pasiva se activará y cubrirá completamente la punta del fiador, (Figura D)
- Descarte el fiador en el contenedor de cortopunzantes.



Conexión de la línea de infusión o accesorio

- De acuerdo al protocolo de la Institución conecte una alargadera con válvula sin aguja o equipos de infusión intravenosa. (Figura E)



Fijación

- Estabilice el catéter colocando un apósito adhesivo transparente. (Figura F)



Componentes

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Cámara de visualización | 3. Pestaña de Empuje |
| 2. Sistema de Seguridad Pasiva | 4. Cuerpo del catéter |